



Οδηγίες χρήσης



INSTRUCTIONS AVAILABLE



TRANSLATION AVAILABLE

<https://medicaldevicesinc.com/ifu/>



Περιγραφή προϊόντος

Τα επιθέματα Halo είναι ιατροτεχνολογικά προϊόντα που αποτελούνται από ένα αυτοκόλλητο στρώμα υδρογέλης και ένα αυτοκόλλητο (μη λατέξ) στρώμα υποστήριξης. Τα επιθέματα Halo δεν περιέχουν φαρμακευτικές ουσίες και δεν κατασκευάζονται από ζωικά ή ανθρώπινα παράγωγα. Τα επιθέματα Halo είναι αδιαπέραστα στα υγρά και σφραγίζουν το τραύμα. Τα επιθέματα Halo προορίζονται για χρήση μέχρι ο ασθενής να μεταφερθεί σε μονάδα υγειονομικής περίθαλψης, όπου θα αφαιρεθούν για την αξιολόγηση του ασθενούς και τη μετεγχειρητική φροντίδα.

Ενδείξεις χρήσεως

Τα επιθέματα Halo έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν και να προστατεύουν τις πληγές. Μην χρησιμοποιείτε τον επίδεσμο ως υποκατάστατο των ραμμάτων και άλλων πρωτογενών μεθόδων κλεισίματος τραυμάτων. Τα επιθέματα Halo είναι προϊόντα μιας χρήσης και η προσπάθεια επαναχρησιμοποίησης των επιθεμάτων Halo μπορεί να επιφέρει επιμόλυνση και λοίμωξη.

Προβλεπόμενη χρήση/προβλεπόμενος σκοπός

Τα επιθέματα Halo είναι μη απορροφήσιμα και μη αποστειρωμένα, αποφρακτικά επιθέματα τραύματος, που προορίζονται να καλύπτουν ένα τραύμα και να παρέχουν μηχανικό φραγμό.

Προφίλ ασθενούς

Τα επιθέματα Halo προορίζονται για χρήση σε ασθενείς με πιθανό θωρακικό τραύμα.

Εφαρμογή

1. Καθαρίστε και στεγνώστε την περιοχή.
2. Αφαιρέστε τη διαφανή επένδυση. Μην τοποθετείτε σε δευτερεύουσα επιφάνεια πριν την εφαρμογή για να αποφύγετε την επιμόλυνση.
3. Τοποθετήστε το επίθεμα Halo με την πλευρά της γέλης προς τα κάτω στο κέντρο του τραύματος.
4. Χρησιμοποιήστε ελαφριά πίεση - μην τεντώνετε κατά την εφαρμογή.
5. Συνεχίστε να αξιολογείτε τον ασθενή και να παρακολουθείτε τη δράση του θωρακικού επιθέματος. Παρακολουθήστε τον ασθενή για συμπτώματα αυξημένου πόνου ή δυσκολίας στην αναπνοή.
6. Επανασφραγίστε το επίθεμα Halo, εάν απαιτείται.
7. Εάν υπάρχουν επιπλέον θωρακικά τραύματα, επαναλάβετε τα βήματα 1-4 με άλλο προϊόν επιθέματος Halo.
8. Μεταφέρετε τον ασθενή σε μονάδα επείγουσας περίθαλψης για μετεγχειρητική θεραπεία και αξιολόγηση.
9. Απορρίψτε μετά τη χρήση, σύμφωνα με τις τοπικές οδηγίες για τα απόβλητα ιατροτεχνολογικών προϊόντων.



CLEAN AND DRY AREA



REMOVE PRODUCT FROM PACKAGING. REMOVE CLEAR LINER



APPLY PRODUCT WITH LIGHT PRESSURE. DO NOT STRETCH PRODUCT



TRANSPORT PATIENT TO EMERGENCY CARE FACILITY FOR POST TREATMENT




DO NOT USE IF PACKAGE IS DAMAGED OR OPEN



NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX



NOT STERILIZED DO NOT REUSE

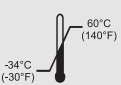

STORAGE TEMPERATURE



MEDICAL DEVICE

Please contact or report any serious incidents regarding this product to the manufacturer and regulatory authorities.

[medicaldevicesinc.com](https://www.medicaldevicesinc.com)



Medical Devices, Inc.
11501 Metro Airport Center
Dr, STE 100, Romulus,
MI 48174, USA
+1 (800) 828-4681
info@medicaldevicesinc.com



2862

EC REP

Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03



Οδηγίες χρήσης



INSTRUCTIONS AVAILABLE



TRANSLATION AVAILABLE

<https://medicaldevicesinc.com/ifu/>



Προειδοποιήσεις

- Βεβαιωθείτε ότι το Halo Seal σφραγίζει πλήρως την περίμετρο του τραύματος για να αποτρέψει την είσοδο αέρα, υγρών και υπολειμμάτων. Τα άτομα με θωρακικές κακώσεις θα πρέπει να μεταφέρονται αμέσως σε μονάδα υγειονομικής περίθαλψης ή τραύματος για αξιολόγηση.
- Μην χρησιμοποιείτε το Halo Seal ως υποκατάστατο των ραμμάτων και άλλων πρωτογενών μεθόδων κλεισίματος τραυμάτων.
- Οι προσπάθειες επαναχρησιμοποίησης του Halo Seal μπορεί να προκαλέσουν επιμόλυνση και λοίμωξη.
- Απορρίψτε μετά τη χρήση, σύμφωνα με τις τοπικές οδηγίες για τα απόβλητα ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
- Μην το τοποθετείτε πάνω από προεξέχοντα αντικείμενα, καθώς αυτό μπορεί να επιδεινώσει τον τραυματισμό.

Αντενδείξεις

Μην το χρησιμοποιείτε για μεταχειρουργικές εφαρμογές.

Χαρακτηριστικά απόδοσης

- Προσκολλάται στην επιφάνεια του δέρματος σε ακραίες συνθήκες και θερμοκρασίες, ακόμη και παρουσία υγρασίας, πλευριτικών υγρών ή αίματος.
- Ο επίδεσμος έχει σχεδιαστεί για να σφραγίζει αποτελεσματικά την περίμετρο του τραύματος, ώστε να το καλύπτει και να το προστατεύει.
- Σφραγίζει τη θωρακική κοιλότητα και είναι αδιαπέραστη σε υγρά, αέρα και υπολείμματα που μπορεί να εισχωρήσουν στο τραύμα από το εξωτερικό περιβάλλον.

Κλινικά οφέλη

- Μειώνει τον κίνδυνο εισόδου αέρα, υγρών ή υπολειμμάτων που μπορεί να μολύνουν το τραύμα.
- Παρέχει πρόσθετο χρόνο σε επείγουσες περιπτώσεις έως ότου ο ασθενής μεταφερθεί σε μονάδα υγείας.

Κλινικοί ισχυρισμοί

- Σφραγίζει αποτελεσματικά την περίμετρο του τραύματος, εάν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Αδιαπέραστο σε υγρά, αέρα και υπολείμματα που μπορεί να μολύνουν το τραύμα.



Please contact or report any serious incidents regarding this product to the manufacturer and regulatory authorities.

[medicaldevicesinc.com](https://www.medicaldevicesinc.com)



Medical Devices, Inc.
11501 Metro Airport Center
Dr, STE 100, Romulus,
MI 48174, USA
+1 (800) 828-4681
info@medicaldevicesinc.com



EC REP

Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03

